



본 제품의 사용 전 사용설명서를 숙지 후 사용하시기 바랍니다.

본 제품은 **일회용 의료기기**이므로 **재사용을 금지**하며, 의료기기 취급자만이 판매 및 사용할 수 있습니다.

본 제품은 비 멸균상태로 제공되므로 **멸균 후 사용**하여야 합니다.

**// 사용목적 //**

뼈를 고정하거나 조이는 기구

**// 사용방법 //**

**1. 사용 전 준비사항**

- 1) 사용 전에 외관상 현저한 변형이나 크랙, 핀홀, 이물질 부착 등을 확인하여야 한다.
- 2) 청결상태 및 멸균 상태를 확인해야 한다.
- 3) 소독복을 착용하지 않은 사람은 멸균된 기구에 닿지 않도록 해야 한다.
- 4) 철저히 주의깊게 RUSH Pin을 세척해야 한다.(세척방법: 초음파 세척, 수 세척, 자동 세척기)
- 5) 세척 후 잔류물이 전혀 남지 않도록 세심한 주의를 기울여야 한다.
- 6) 멸균방법은 고압 증기 소독법(Autoclave)으로 한다.
- 7) 소독 시에는 소독방법을 준수하고, 설비는 제조회사의 사용방법을 철저히 숙지 후 사용한다.

**2. 사용 방법**

- 1) 반드시 정해진 용도로만 사용하며 이외의 용도로 사용하지 않아야 한다.
- 2) 외관상으로 표면에 흠집, 굽힘 등이 육안으로 판단될 경우 다른 제품으로 교체한다.
- 3) 심한 충격이나 바닥에 떨어뜨렸을 경우 즉시 생체금속류에 손상 및 이물질의 부착을 확인하고 이상이 있을 시는 다른 제품으로 교체한다.

- 4) 전문의가 환자에 알맞은 제품을 선택하고 적절한 시술기구를 이용하여 시술한다.
- 5) 수술 전 수술방법, 제거술, 시술위치 선정 등을 충분히 숙지한다.
- 6) 시술 후에는 환자에게 경고, 주의사항, 금기 및 부작용을 충분히 안내하여 숙지하도록 한다.
- 7) 전문의가 환자의 상태 및 치유 결과를 판단하여 제품의 제거여부를 결정한다.

**3. 사용 후 보관 및 관리방법**

본 제품은 일회용 비 멸균 의료기기이며, 재사용을 금지한다.

**// 사용 시 주의사항 //**

- 1) 잘못 사용으로 인한 제품은 결함발생 시 즉시 폐기처분한다.
- 2) 사용에 투입되지 않은 제품은 실온의 건조한 곳에서 보관한다.
- 3) 흠집, 변형, 파손의 우려가 있으므로 무거운 물건을 올려놓는 등 다른 기구와 겹쳐지지 않도록 주의하여 보관한다.
- 4) 제품의 표면, 형태 등이 변형되지 않도록 보관하고 타 금속으로 된 제품과 격리 보관한다.

**// 저장방법 //**

실온의 건조한 곳에서 보관한다.

**// 기호에 대한 설명 //**

| 기호 | 설명      | 기호 | 설명            |
|----|---------|----|---------------|
|    | 재사용 금지  |    | 포장 손상 시 사용 금지 |
|    | 제조번호    |    | 제조사           |
|    | 카달로그 번호 |    | 제조일자          |
|    | 비 멸균    |    | 주의            |

|   |             |   |       |
|---|-------------|---|-------|
|  | 사용설명서<br>참조 |  | 수량    |
|  | 건조 보관       |  | 온도 제한 |